



Collirio lubrificante Opti-free

€

📍 Mappa



📄 Descrizione

Confezione da 10 ml
Contenuto: OPTI-FREE® PRO Gocce Oculari Lubrificanti è un prodotto sterile contenente glicole propilenico, idrossipropil guar, olio minerale, dimiristoil fosfatidilglicolo, poliossil-40-stearato, sorbitano, tristearato, acido borico, sorbitolo, disodio ed atato, POLYQUAD 0.0001% come conservante e acqua depurata. Può contenere acido cloridrico e/o idrossido di sodio per regolare il pH. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: OPTI-FREE® PRO Gocce Oculari Lubrificanti può essere utilizzato per aiutare a ripristinare e proteggere la lubrificazione Vitale della superficie dell'occhio prima e/o dopo l'utilizzo della lente a contatto in modo da contribuire ad alleviare la secchezza oculare e proteggere l'occhio da ulteriore irritazione. Esso contiene una combinazione esclusiva di surfattante e componenti oleosi la cui azione serve a creare una struttura protettiva sullo strato esterno del film lacrimale, aiutando a mantenere una lubrificazione vitale. ISTRUZIONI D'USO Agitare bene prima dell'uso. Instillare (o applicare) le gocce prima di inserire le lenti a contatto e/o dopo averle tolte. Instillare (o applicare) 1-2 gocce nell'occhio interessato, secondo necessità. PRECAUZIONI E AVVERTENZE E' essenziale attenersi alle istruzioni del suo specialista nonché a tutte le indicazioni riportate sulle etichette per l'uso corretto del prodotto. Se lei dovesse avvertire una sensazione di fastidio, lacrimazione eccessiva, alterazioni della vista o arrossamento dell'occhio, sospenda l'uso e si rivolga al suo specialista. Se il prodotto cambia colore, non utilizzarlo. Per non contaminare la soluzione, non mettere mai la punta del flacone a contatto con nessuna superficie. Prima dell'uso togliere le lenti a contatto. Rimettere il tappo dopo l'uso. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. Tenere il contenitore ben chiuso quando non è utilizzato. Usare entro la data di scadenza indicata sul prodotto. Eliminare l'eventuale prodotto rimasto dopo 6 mesi dalla prima apertura del flacone.

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, L
ucca, 55100

Nessun orario indicato
