



Biotrue Soluzione idratante per lenti a contatto

€

Mappa



Descrizione

Contenuto: Soluzione isotonica sterile contenente Hyaluronan, sulfobetaina, poloxamina, acido borico, sodio borato, disodio edatato, cloruro di sodio, poliaminopropilbiguanide 0.00013% e polyquaternium 0.0001%. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: Umetta, pulisce, disinfetta, risciacqua e conserva le lenti incluse quelle in silicone Hydrogel, elimina le proteine. Gli occhi a volte possono trovarsi a disagio quando si portano le lenti. In un mondo in cui si dorme sempre meno e si usa sempre più il computer può essere difficile mantenere il comfort ed il giusto grado di idratazione degli occhi. Biotrue rende confortevole l'uso delle lenti, perché si comporta come i tuoi occhi. Biotrue ha un pH uguale a quello delle lacrime naturali e contiene un lubrificante presente nell'occhio. Le ricerche dimostrano che Biotrue contribuisce a mantenere le lenti idratate fino a 20 ore. ISTRUZIONI D'USO PUNTO 1: Mettere 3 gocce di Biotrue® Soluzione Unica su ciascuna superficie della lente e strofinare delicatamente per 20 secondi. PUNTO 2: Risciacquare accuratamente entrambe le superfici della lente per 5 secondi con Biotrue® Soluzione Unica. PUNTO 3: Porre le lenti così pulite nel portalenti, riempire con Biotrue® Soluzione Unica fresca (appena prelevata dal flacone) e chiudere il portalenti. Lasciare le lenti immerse per almeno 4 ore. Le lenti sono ora pronte per l'uso. Non occorre risciacquare con salina. Ricordare di usare sempre soluzione fresca. Se rimane qualche residuo sulla lente, risciacquare con Biotrue® Soluzione Unica prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del vostro Contattologo. Sulla base delle caratteristiche chimiche individuali del vostro liquido lacrimale e dei vostri tempi di utilizzo delle lenti, il vostro Contattologo può raccomandare l'impiego di ulteriori prodotti o procedure di manutenzione. Potete conservare le lenti nel portalenti ben chiuso fino al momento di applicarle per un massimo di 30 giorni. Azioni: Se usata quotidianamente, la soluzione unica Biotrue® distacca le proteine e pulisce, scioglie e rimuove gli accumuli di film lacrimale, residui e depositi delle lenti a contatto morbide. La soluzione unica Biotrue® combatte la formazione di depositi irritanti sulla superficie delle lenti. Elimina i microrganismi nocivi pre-

senti sulle lenti. Mentre le lenti sono immerse e nella soluzione, la formulazione le avvolge in uno strato ricco di acqua che le fa rimanere confortevoli per tutto il giorno. La soluzione unica Biotrue® può essere utilizzata anche per risciacquare le lenti. Vantaggi: Si comporta come i tuoi occhi. La soluzione unica Biotrue® contiene un lubrificante presente nell'occhio umano, ed ha un pH bilanciato uguale a quello delle lacrime naturali. La soluzione unica Biotrue® crea un effetto come un cuscinetto d'acqua ed idrata le lenti per un uso confortevole. La soluzione unica Biotrue® aiuta a prevenire la denaturazione di alcune proteine naturali, questo garantisce la pulizia delle lenti e inibisce la formazione di depositi che possono provocare discomfort ed abbreviare i tempi di uso delle lenti. Mantenendo le lenti idratate e pulite la soluzione unica Biotrue® ne garantisce un uso confortevole per tutto il giorno. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Sottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista. Prima di toccare le lenti, lavare ed asciugare sempre le mani. Con le lenti o il porta lenti non utilizzare mai acqua del rubinetto, minerale in bottiglia oppure saliva. Per pulire e disinfettare utilizzare solo soluzione fresca. Da non utilizzare con la disinfezione termica (a caldo). Dopo ogni ciclo di disinfezione, gettare sempre tutta la soluzione rimasta nel portalenti. Soluzione salina o lacrime artificiali non disinfettano le lenti. Sostituire sempre il portalenti ogni mese. Non usare nessun farmaco per gli occhi in abbinamento a questa soluzione, se non sotto controllo medico. Tenere il flacone ben chiuso quando non utilizzato. Usare prima della data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone. Gettare la soluzione rimasta entro 90 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere al di fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. IMPORTANTE: In caso di irritazione oculare o eccessiva lacrimazione persistente o in aumento, o di problemi di visione, sospendere l'uso delle lenti e rivolgersi immediatamente al Medico Oculista.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
