



Pemag Plus 2 Soluzione per lenti a contatto

€

📍 Mappa



📄 Descrizione

Pemag Plus 2 è una soluzione unica indicata per la disinfezione chimica (non termica), la pulizia giornaliera, l'eliminazione dei depositi proteici, la lubrificazione, il risciacquo e la conservazione di tutti i tipi di lenti a contatto morbide. Confezione da 500 ml. Contiene portamenti. Contenuto: Idrossialchilfosfonato 0.03%, acido bórico, disodio edetato, poloxamin a 1%, sodio borato e sodio cloruro; preservativo con poliaminopropilbiguanide 0.0001%. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: Pemag Plus 2 soluzione unica è indicata per l'uso della pulizia quotidiana, nel rimuovere i depositi di proteine, nel risciacquo, nella disinfezione chimica (non termica) e nella conservazione delle lenti a contatto a portamento giornaliero o prolungato come raccomandato dal vostro Contattologo. AZIONI: Pulisce, distacca e rimuove gli accumuli di liquido lacrimale, proteine, i depositi e i residui delle lenti a contatto morbide. Distrugge i microrganismi nocivi sulla superficie della lente. Risciacqua, conserva e idrata le lenti prima della loro applicazione. ISTRUZIONI D'USO STEP 1: Mettere 3 gocce di PEMAG PLUS 2 soluzione unica su ciascuna superficie della lente e strofinare delicatamente per 20 secondi. STEP 2: Risciacquare accuratamente entrambe le superfici della lente per 5 secondi con Pemag Plus 2 soluzione unica. STEP 3: Porre le lenti così pulite nel portamenti, riempire con Pemag Plus 2 soluzione unica fresca (appena prelevata dal flacone) e chiudere il portamenti. Lasciare le lenti immerse per almeno 4 ore. Le lenti sono ora pronte per l'uso. Non occorre risciacquare con salina. Ricordare di usare sempre soluzione fresca. Se rimane qualche residuo sulla lente, risciacquare con Pemag Plus 2 soluzione unica prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del vostro contattologo. Sulla base delle caratteristiche chimiche individuali del vostro liquido lacrimale e dei vostri tempi di utilizzo delle lenti, il vostro Contattologo può raccomandare l'impiego di ulteriori prodotti o procedure di manutenzione. Potete conservare le lenti nel portamenti ben chiuso fino al momento di applicarle per un massimo di 30 giorni. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Gettare sempre la soluzione del portamenti dopo ogni utilizzo. Tenere il flacone ben chiuso quando non viene utilizzato. Usare prima della data

a di scadenza stampigliata sulla scatola e sul flacone. Gettare la soluzione rimasta entro 90 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere al di fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. Non utilizzare se siete allergici anche ad uno solo degli ingredienti del prodotto. Soluzione salina o lacrime artificiali non disinfettano le lenti. Sostituire sempre il portalelenti ogni mese. Non utilizzare con la disinfezione termica (a caldo) delle lenti. Non usare nessun farmaco per gli occhi in abbinamento a questa soluzione, se non sotto controllo medico. **IMPORTANTE:** In caso di irritazione oculare o eccessiva lacrimazione persistente o in aumento, o di problemi di visione, sospendere l'uso delle lenti e rivolgersi immediatamente al Medico Oculista.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
