



Avizor Alvera Soluzione detergente per lenti a contatto

€

📍 Mappa



📄 Descrizione

Soluzione Unica con Aloe Vera ideale per lenti a contatto in silicone Idrogel. Pulisce ed elimina i residui (proteine e lipidi), disinfetta (efficace contro batteri, funghi e acanthamoeba) per una maggiore protezione dell'epitelio corneale ed una eccezionale idratazione. Confezione da 350 ml. Contiene portalenti. Contenuto: Soluzione acquosa isotonica e tamponata con polixamer, EDTA, aAloe Vera, poliesani de 0.0002%. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. ISTRUZIONI D'USO Prima di manipolare le lenti, lavarsi bene le mani con acqua e sapone. Rimuovere la lente dall'occhio, collocarla sul palmo della mano con delle gocce di Avizor Alvera Soluzione Unica e sfregare entrambi i lati per qualche secondo. Risciacquare entrambi i lati della lente per almeno 5 secondi con Avizor Alvera Soluzione Unica. Depositare ogni lente nel suo compartimento e riempire l'astuccio portalenti con la soluzione Avizor Alvera Soluzione Unica fino a coprire completamente le lenti. Chiudere l'astuccio e agitarlo per qualche secondo. Mantenere le lenti per almeno 6 ore, o per tutta la notte, immerse nella soluzione per garantire una completa disinfezione. Una volta concluso il processo si può portare la lente direttamente all'occhio, o risciacquarla prima se lo si desidera. Risciacquare l'astuccio portalenti con Avizor Alvera Soluzione Unica e lasciarlo asciugare all'aria. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Dopo l'apertura del flacone, non bisogna utilizzarlo una volta trascorsi 90 giorni. Mantenere il flacone ben chiuso. E' possibile conservare le lenti nel portalenti chiuso per 30 giorni. Non ingerire la soluzione e tenerla lontana dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. Non toccare il contagocce con nessuna superficie per evitare contaminazioni. In caso di irritazione oculare rivolgersi ad uno specialista. Prima di utilizzare qualsiasi medicinale oftalmico, informare il vostro dottore di essere utilizzatore di lenti a contatto. Non utilizzare acqua del rubinetto per pulire il portalenti. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Non riutilizzare mai la solita soluzione, gettarle dopo ogni utilizzo e usare sempre fresca.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
