



Renu Multiplus Soluzione idratante per lenti a contatto

€

Mappa



Descrizione

Comfort di una lente fresca ogni giorno. Man tiene idrate e pulite le tue lenti che ti sembrerà quasi di portarne un paio nuovo ogni giorno. Confezione da 360 ml. Contiene portalenti. Contenuto: Soluzione sterile, isotonica contenente HYDRANATE (Hydroxyalkyl phosphonate) 0.03%, acido boric, disodio acetato, poloxamina 1%, sodio borato e sodio cloruro, preservato con DYMED (polyaminopropyl biguanide) 0.0001%. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: ReNu MultiPlus contribuisce a mantenere il comfort delle tue lenti a contatto. Usalo per pulire, risciacquare, per la disinfezione chimica (non termica) e per conservare le tue lenti a contatto morbide. La soluzione unica ReNu MultiPlus contiene Hydranate, un particolare componente che rimuove i depositi proteici durante la disinfezione delle tue lenti. ISTRUZIONI D'USO STEP 1: Mettere 3 gocce di ReNu MultiPlus Multi-Purpose Solution su ciascuna superficie della lente e strofinare delicatamente per 20 secondi. STEP 2: Risciacquare accuratamente entrambe le superfici della lente per 5 secondi con ReNu MultiPlus Multi-Purpose Solution. STEP 3: Porre le lenti così pulite nei portalenti, riempire con ReNu MultiPlus Multi-Purpose Solution fresca (appena prelevata dalla confezione) e chiudere i portalenti. Lasciare le lenti immerse per almeno 4 ore. Le lenti sono ora pronte per l'uso. Non occorre risciacquare con salina. Ricordare di usare sempre soluzione fresca. Se rimane qualche residuo sulla lente, risciacquare con ReNu MultiPlus Multi-Purpose Solution prima di applicarle. Seguire sempre le istruzioni del vostro Contattologo. Sulla base delle caratteristiche chimiche individuali del vostro liquido lacrimale e dei vostri tempi di utilizzo delle lenti, il vostro Contattologo può raccomandare l'impiego di ulteriori prodotti o procedure di manutenzione. Potete conservare le lenti nei portalenti ben chiusi fino al momento di applicarle per un massimo di 30 giorni. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Sottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista. Prima di toccare le lenti, lavare ed asciugare sempre le mani. Con le lenti o il portale lenti non utilizzare mai acqua del rubinetto, minerale in bottiglia oppure saliva. Per pulire e disinfettare utilizzare solo soluzione fresca. Dopo ogni ciclo di disinfezione, g

ettare sempre tuta la soluzione rimasta nel portalenti. Soluzione salina o lacrime artificiali non disinfettano le lenti. Sostituire sempre il portalenti ogni mese. Non utilizzare con la disinfezione termica (a caldo) delle lenti. Non usare nessun farmaco per gli occhi in abbinamento a questa soluzione, se non sotto controllo medico. Tenere il flacone ben chiuso quando non utilizzato. Usare prima della data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone. Gettare la soluzione rimasta entro 90 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere al di fuori della portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente. IMPORTANT E: In caso di irritazione oculare o eccessiva lacrimazione persistente o in aumento, o di problemi di visione, sospendere l'uso delle lenti e rivolgersi immediatamente al Medico Oculista.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
