



Soluzione salina lom per lenti a contatt

o

€

Mappa

□

Descrizione

Soluzione salina sterile, isotonica e tamponata che contiene un agente batteriostatico. Indicata per il risciacquo di tutti i tipi di lenti a contatto e per la disinfezione termica delle lenti a contatto morbide. Confezione da 500 ml. Contenuto: Salina soluzione è una soluzione sterile, isotonica e tamponata contiene acido borato, potassio cloruro, sodio cloruro, preservata con poli-esa-metilen-amino guanidina 0.00003% e disodio edatato. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: Salina Soluzione è una soluzione sterile preservata per RISCIAQUARE le lenti dopo la pulizia e prima di applicarle sugli occhi. Per utilizzo con disinfezione a caldo di lenti a contatto morbide, disinfezione chimica (a freddo) o sistemi a base di perossido di idrogeno. Può essere anche utilizzata per disciogliere le tavolette enzimatiche. ISTRUZIONI D'USO Risciacquo dopo la pulizia: Pulire le lenti con un detergente come raccomandato dal vostro contattologo. Dopo la pulizia, risciacquare accuratamente le lenti con Salina Soluzione, tenendo la lente tra il dito pollice ed indice, oppure ponendola sul palmo della mano. Dirigere il getto di Salina Soluzione direttamente sulla lente. Disinfezione delle lenti a contatto morbide A CALDO: Riempire le vaschette portalenti fino al 2/3 con Salina Soluzione. Riporre le lenti morbide dopo averle pulite e risciacquate nell'apposita vaschetta del portalenti. Chiudere bene i tappi del portalenti. Riporre il portalenti nell'apparecchio disinfettante e seguirne le istruzioni per l'uso. Dopo la disinfezione le lenti sono pronte per essere applicate sugli occhi. Disinfezione chimica e sistemi al Perossido di Idrogeno: Pulire, risciacquare e disinfettare le lenti come da istruzioni del vostro Contattologo. Prima di applicare le lenti sugli occhi risciacquarle con Salina Soluzione. Le lenti che vengono disinfettate possono assorbire i componenti contenuti nella soluzione disinfettante che possono provocare irritazione oculare. Un risciacquo finale può ridurre potenziali irritazioni. Rimozione delle Proteine/Tavolette e Enzimatiche: Pulire e risciacquare le lenti come da istruzioni del vostro Contattologo. Salina Soluzione può essere utilizzata per disciogliere le tavolette enzimatiche. AVVERTENZE E Sterile fino all'apertura. Gettar via la soluzione dopo 90 giorni dalla prima apertura del fl

acone. Non usare dopo la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Lavare e risciacquare le mani prima di toccare le lenti. PRECAUZIONI Conservare a temperatura ambiente. Pulire, risciacquare e disinfettare sempre le lenti ogni volta che le togliete dagli occhi. Non riutilizzare Salina Soluzione. Tenere sempre il flacone ben chiuso quando non in uso. Una volta applicate le lenti gettare sempre via la soluzione rimasta nel portalenti e risciacquare con Salina Soluzione. Per prevenire contaminazioni, evitare ogni contatto col beccuccio del flacone aperto e qualunque oggetto. Ogni giorno seguire sempre le procedure raccomandate dal vostro Contattologo. Il mancato rispetto di queste procedure può portare allo sviluppo di serie infezioni oculari. In caso di irritazione persistente o crescente sospendere l'uso del prodotto e consultare il vostro medico Oculista.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
