



Soluzione per lenti a contatto Solo-care Acqua

€

📍 Mappa

□

✓ Descrizione

Pulisce, disinfetta, conserva e rimuove le proteine. Contiene pro-vitamina B5 e sorbitolo per lenti idratate a lungo. Utilizzo in due modalità: "Express" (5 minuti di sfregamento e risciacquo) o "Standard" (immersione per 4 ore negli appositi portalenti). Il portaleenti MicroBlock? con ioni d'argento svolge un'azione antibatterica. Confezione da 360 ml. Contiene portaleenti. Contenuto: Soluzione acquosa isotonica, anti-microbica/anti batterica contenente: polyhexanide 0.0001% (principio attivo e conservante), dexpanthenol e sorbitol, sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407, disodium edate. Prodotto in asepsi. Il portaleenti antibatterico MicroBlock? contiene argento. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. ISTRUZIONI D'USO Lavare le mani e asciugarle con un asciugamano pulito. Aprire il portaleenti. Togliere la lente dall'occhio e sistemarla sul palmo della mano. Mettere almeno 3 gocce di SOLO-care AQUA? Soluzione Unica su ciascuna delle superfici della lente. Strofinare delicatamente la lente con movimento circolare per almeno 10 secondi. Sciacquare abbondantemente con SOLO-care AQUA? Soluzione Unica mentre si strofina delicatamente tra il pollice e l'indice per almeno 10 secondi. Sistemare la lente nel portaleenti riempire fino alla linea di dosaggio con SOLO-care AQUA? Soluzione Unica fresca. Rimettere il tappo e chiuderlo avvitando. Ripetere la procedura con l'altra lente. LASCIARE LE LENTI IN IMMERSIONE PER ALMENO 5 MINUTI. Ora le vostre lenti possono essere indossate direttamente. Gettare la soluzione del portaleenti, sciacquare il portaleenti con SOLO-care AQUA? Soluzione Unica fresca e lasciarlo chiuso fino al prossimo utilizzo. Se le lenti sono rimaste nella soluzione SOLO-care AQUA? per più di 30 giorni prima di essere indossate, gettare la soluzione dal portaleenti, ripetere la procedura di pulizia manuale e disinfettare le lenti immergendole in SOLO-care AQUA? Soluzione Unica per almeno 5 minuti prima di indossarle. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Non utilizzare dopo la data di scadenza. Chiudere il flacone dopo ogni utilizzo. Dopo 3 mesi dall'apertura del flacone, gettare la soluzione rimasta. Non mettere mai l'estremità contagocce del flacone a contatto con alcuna superficie, poiché questo potrebbe contaminare la soluzione.

ne. Sostituire il portamenti con quello nuovo contenuto in ogni confezione SOLO-care AQUA? Soluzione Unica. Conservare a temperatura ambiente. Utilizzare sempre SOLO-care AQUA? Soluzione Unica fresca. Mai trasferire SOLO-care AQUA? Soluzione Unica in un altro contenitore. Mai diluire o mescolare SOLO-care AQUA? Soluzione Unica con qualsiasi altra soluzione poichè perderebbe la sua efficacia. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di fastidio o irritazioni persistenti togliere le lenti, sospendere l'uso del prodotto e consultare lo specialista di fiducia.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato
