



Biotrue Soluzione idratante per lenti a c ontatto







Contenuto: Soluzione isotonica sterile conte

nente Hyaluronan, sulfobetaina, poloxamina, acido borico, sodio borato, disodio edatato, cl oruro di sodio, poliamino propibiguani de 0.00 013% e polyquaternium 0.0001%. Non utilizz are il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: Umet ta, pulisce, disinfetta, risciacqua e conserva le lenti incluse quelle in silicone Hydrogel,elimi na le proteine. Gli occhi a volte possono trov arsi a disagio quando si portano le lenti. In u n mondo in cui si dorme sempre meno e si usa sempre più il computer può essere diffic ile mantenere il comfort ed il gusto grado di idratazione degli occhi. Biotrue rende confor tevole l'uso delle lenti, perchè si comporta c ome i tuoi occhi. Biotrue ho un ph uguale a q uello delle lacrime naturali e contiene un lub rificante presente nell'occhio. Le ricerche di mostrano che Biortrue contribuisce a mante nere le lenti idratate fino a 20 ore. ISTRUZIO NI D'USO PUNTO 1: Mettere 3 goccie di Biotr ue® Soluzione Unica su ciascuna superficie della lente e strofinare delicatamente per 20 secondi. PUNTO 2: Risciacquare accuratame nte entrambe le superfici della lente per 5 se condi con Biotrue® Soluzione Unica. PUNTO 3: Porre le lenti cosi pulite nel portalenti, rie mpire con Biotrue® Soluzione Unica fresca (appena prelevata dal flacone) e chiudere il p ortalenti. Lasciare le lenti immerse per alme no 4 ore. Le lenti sono ora pronte per l'uso. Non occorre risciacquarle con salina. Ricord are di usare sempre soluzione fresca. Se rim ane qualche residuo sulla lente, risciacquare con Biotrue® Soluzione Unica prima di appli carle. Seguire sempre le istruzioni del vostro Contattologo. Sulla base delle caratteristiche chimiche individuali del vostro liquido lacrim ale e dei vostri tempi di utilizzo delle lenti,il v ostro Contattologo può raccomandare l'impi ego di ulteriori prodotti o procedure di man utenzione. Potete conservare le lenti nel por talenti ben chiuso fino al momento di applica rle per un massimo di 30 giorni. Azioni: Se us ata quotidianamente, la soluzione unica Biot rue® distacca le proteine e pulisce, discioglie e rimuove gli accumuli di film lacrimale, resid ui e depositi delle lenti a contatto morbide. I

a soluzione unica Biotrue® combattela la for www.sihappy.it mazione di depositi irritanti sulla superficie delle lenti. Elimina i microrganismi nocivi pre

senti sulle lenti. Mentre le lenti sono immers e nella soluzione,la formulazione le avvolge i n uno strato ricco di acqua che le fa rimaner e confortevoli per tutto il giorno. La soluzion e unica Biotrue® può essere utilizzata anche per risciacquare le lenti. Vantaggi: Si compor ta come i tuoi occhi. La soluzione unica Biotr ue® contiene un lubrificante presente nell'o cchio umano, ed ha un ph bilanciato uguale a quello delle lacrime natuali. La soluzione u nica Biotrue® crea un effetto come un cusci netto d'acqua ed idrata le lenti per un uso co nfortevole. La soluzione unica Biotrue® aiut a a prevenire la denaturazione di alcune pro teine naturali. questo garantisce la pulizia de lle lenti e inibisce la formazione di depositi c he possono provocare discomfort ed abbrev iare i tempi di uso delle lenti. Mantenendo le lenti idratate e pulite la soluzione unica Biotr ue® ne garantisce un uso confortevole per t utto il giorno. PRECAUZIONI E AVVERTENZE S ottoporsi a visite regolari dal proprio Medico Oculista. Prima di toccare le lenti, lavare ed a sciugare sempre le mani. Con le lenti o il por ta lenti non utilizare mai acqua del rubinetti, minerale in bottiglia oppure saliva. Per pulire e disinfettare utilizzare solo soluzione fresca. Da non utilizzare con la disinfezione t ermica (a caldo). Dopo ogni ciclo di disinfezio ne,gettare sempre tutta la soluzione rimasta nel portalenti. Soluzione salina o lacrime arti ficiali non disinfettano le lenti. Sostituire sem pre il portalenti ogni mese. Non usare nessu n farmaco per gli occhi in abbinamento a qu esta soluzione, se non sotto controllo medic o. Tenere il flacone ben chiuso quando non u tilizzato. Usare prima della data di scadenza riportata sulla confezione e sul flacone. Gett are la soluzione rimasta entro 90 giorni dalla prima apertura del flacone. Tenere al di fuor i della portata dei bambini. Conservare a te mperatura ambiente. IMPORTANTE: In caso di irritazione oculare o eccessiva lacrimazion e persistente o in aumento, o di problemi di v isione, sospendere l'uso dele lenti e rivolgers i immediatamente al Medico Oculista.



GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, L ucca, 55100 Nessun orario indicato