



## Avizor Sensitive soluzione per lenti a contatto

€

### 📍 Mappa



### 📄 Descrizione

Soluzione unica appositamente formulata per fornire il massimo comfort per i pazienti più sensibili. La combinazione di acido ialuronico e la concentrazione minima di conservanti, rende AVIZOR SENSITIVE la scelta migliore per i portatori di lenti a contatto morbide con occhi sensibili. Confezione da 350 ml. Contiene portalenti. Contenuto: ialuronato sodico, poloxamer, EDTA, polyhexanide 0.0001% in una soluzione sterile, tamponata, isotonica. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Istruzioni d'uso: Lavarsi accuratamente le mani prima di procedere alla pulizia delle lenti. Mettere le lenti nel palmo della mano e mettere alcune gocce di Sensitive Soluzione Unica sulle due facce della lente e strofinare delicatamente per alcuni secondi. Risciacquare le lenti con Sensitive Soluzione Unica. Mettere le lenti nei cestelli del portalenti e riempire con Sensitive Soluzione Unica. Lasciare agire durante la notte o per almeno 4 ore. Dopo la disinfezione e prima di mettere le lenti nell'occhio, risciacquare le lenti con nuova Sensitive Soluzione Unica. Dopo l'utilizzazione, risciacquare il portalenti a fondo utilizzando sempre soluzione nuova. Non utilizzare mai l'acqua del rubinetto per pulire la lente a contatto e il portalenti. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Dopo l'apertura del flacone, non bisogna utilizzarlo una volta trascorsi 90 giorni. Mantenere il flacone ben chiuso. E' possibile conservare le lenti nel portalenti chiuso per 30 giorni. Conservare a temperatura ambiente. Non ingerire la soluzione e tenere lontano dalla portata dei bambini. Non toccare il contagocce con nessuna superficie per evitarne la contaminazione. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Gettare la soluzione del portalenti dopo ogni utilizzo.

Powered by **SiHappy.it** © 2024

### ☎️ Contatti

**GRUPPOTTICA SRL**  
Tel. 0583342035V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100  
[www.sihappy.it](http://www.sihappy.it)

Nessun orario indicato

---