



AoSept Plus Soluzione disinfettante per lenti a contatto

€

📍 Mappa



📄 Descrizione

Soluzione a base di perossido per la manutenzione delle lenti a contatto. Deterge, disinfetta e rende umettate per poterle sfruttare anche nelle giornate intense. Caratterizzata da una particolare formula detergente a Tripla Azione: Pulisce in profondità Scioglie sporco e impurità Facilita la rimozione delle proteine e Confezione da 360 ml. Contiene portalenti.

Contenuto: La soluzione acquosa AOSept® Plus, senza conservanti, con HydraGlide® Moisture Matrix contiene: perossido di idrogeno 3%, acido fosfonico (stabilizzatore), cloruro di sodio, fosfato (sistema tampone), poloxanamer (surfattante), HydraGlyde® Moisture Matrix (EOBO-21 - polioossietilene- polioossibutilene). Non utilizzare il prodotto in caso di allergia ad uno dei prodotti sopra menzionati. Indicazioni: AOSept® Plus con HydraGlyde® Moisture Matrix è un sistema per la manutenzione delle lenti per pulire, disinfettare, neutralizzare, rimuovere le proteine e conservare tutti i tipi di lenti a contatto incluse le lenti in silicone idrogel. Il sistema AOSept® Plus comprende: la soluzione pulente e disinfettante AOSept® Plus con HydraGlyde® Moisture Matrix e il portalenti AOSept® Plus. Il portalenti AOSept® Plus è costituito da un contenitore trasparente, da un portalenti connesso con tappo a vite e da un neutralizzatore catalizzatore AODISC attaccato sul fondo. Prima dell'utilizzo assicurarsi che AODISC sia inserito, ciò è essenziale per la neutralizzazione del perossido di idrogeno. La soluzione AOSept® Plus e il portalenti AOSept® Plus devono sempre essere utilizzati insieme. ISTRUZIONI D'USO

- 1) Lavarsi le mani e asciugarle con un asciugamano pulito.
- 2) Aprire lo scomparto del portalenti contrassegnato dalla lettera "L", posizionando la lente sinistra sull'apposito alloggiamento. Chiudere lo scomparto facendo attenzione a non pizzicare la lente.
- 3) Ripetere la procedura con la lente destra, posizionandola nello scomparto contrassegnato con la lettera "R".
- 4) Aprire il coperchio a scatto del flacone di AOSept® Plus.
- 5) Sciacquare accuratamente le lenti contenute negli scomparti con AOSept® Plus per 5 secondi.
- 6) Riempire il contenitore con la soluzione AOSept® Plus fino all'apposita linea di dosaggi, NON RIEMPIRE IN ECCESSO O IN DIFETTO.
- 7) Inserire il portalenti nel contenitore AOSept® Plus e avvitare il coperchio. Non agitare il contenito

re. 8) Riporre il contenitore in posizione verticale. Se dal foro del tappo del portalenti fuoriesce dell'effervescenza, è possibile che sia presente della soluzione AOSept® Plus non neutralizzata. Svuotare completamente il portalenti e rimuovere i residui dalla superficie sulla quale era appoggiato il contenitore AOSept® Plus. Risciacquare accuratamente il contenitore AOSept® Plus ed il portalenti con della soluzione salina sterile. In caso di fuoriuscita, pulire immediatamente con un tovagliolo di carta. Lavare accuratamente le mani prima di maneggiare le lenti o di toccare gli occhi. RIPETERE LA PROCEDURA DI DISINFEZIONE DI CUI SOPRA. 9) Lasciare le lenti immerse in soluzione per almeno 6 ore o per tutta la notte per neutralizzare la soluzione. 10) Togliere le lenti dal portalenti. 11) Ora le lenti possono essere indossate. 12) Gettare la soluzione utilizzata, risciacquare il contenitore AOSept® Plus e il portalenti con soluzione salina sterile. NON UTILIZZARE ACQUA DI RUBINETTO O ACQUA NON STERILE. 13) Fare asciugare il contenitore all'aria aprendo e capovolgendo il portalenti. 14) Se le lenti non vengono indossate e subito dopo la disinfezione/neutralizzazione, possono essere conservate nella soluzione AOSept® Plus neutralizzata fino a 14 giorni, se il portalenti AOSept® Plus non viene aperto. Trascorso tale termine, le lenti devono essere pulite e disinfettate con soluzione AOSept® Plus prima di essere indossate. PRECAUZIONI E AVVERTENZE Non utilizzare dopo la data di scadenza. Chiudere il coperchio a scatto del flacone dopo l'uso. Dopo 3 mesi dall'apertura del flacone, gettare la soluzione rimasta. Non mettere mai l'estremità contagocce del flacone a contatto con alcuna superficie: la soluzione potrebbe contaminarsi. Utilizzare sempre un nuovo portalenti AOSept® Plus fornito con ciascun flacone di soluzione AOSept® Plus. Conservare a temperatura inferiore ai 25°C. Utilizzare sempre la soluzione AOSept® Plus a temperatura compresa tra i 15°C e i 25°C, in quanto a temperature inferiori ai 15°C la neutralizzazione potrebbe richiedere più di 6 ore. Conservare al riparo dalla luce diretta del sole. Consultare lo specialista di fiducia prima di cambiare sistema di manutenzione. La Soluzione AOSept® Plus non neutralizzata non deve essere instillata negli occhi. Utilizzare solo con il portalenti AOSept® Plus. Tenere al di fuori della portata dei bambini.

Contatti

GRUPPOTTICA SRL

Tel. 0583342035

V. Borgo Giannotti 328 - S. Marco, Lucca, 55100

Nessun orario indicato